

## Montageanleitung

Bitte vor der Montage  
aufmerksam lesen !

## Installation

## Instructions

Please read carefully  
before setting-up !

Art.-No. 10.10.05



**Q.Products AG**  
Schlossgut Wiggen, 9404 Rorschacherberg  
BÜRO/OFFICE: Säntisstr. 11, 9401 Rorschach  
Switzerland

Tel. +41 (0) 71 858 20 60  
Fax. +41 (0) 71 858 20 61  
contact@QProducts.info

## STATIV HOME

für **Q.Light® 70**  
Lichttherapiegeräte

## STAND HOME


for **Q.Light® 70**  
Light therapy devices



### 1 Anfang

Nehmen sie das komplett zusammengelegte Stativ aus der Verpackung.


*Take the folded Stand out of the box.*

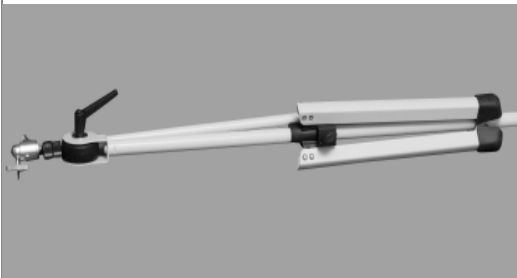

### 2 Standfüße:

Alle drei Füße bis zum Anschlag ausklappen.

*Fold out and position all three legs.*

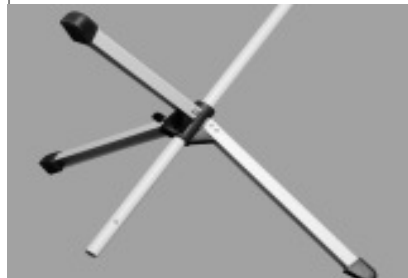

### 3 Standfüße:

Klemmschraube lösen, Fußelement nach unten zum Rohrende ziehen.

Beachten Sie, dass die am Stativrohr befindliche Schraube in die dazu gehörende Aussparung geführt wird.

*Release set screw, pull the legs at based stand down into position. Make sure that the small screw engages into the notch.*



Nur so kann das Fußelement ganz nach unten gezogen werden. Klemmschraube festziehen.

**! Das Stativ ist nur betriebsbereit, wenn das Standrohr komplett im Füsselement versenkt ist.**

**! The stand will be only ready-for-use if the base part is fully extended.**



### 4 Stativarm:

Das Stativ auf einen festen Untergrund stellen.

*Place the stand on a firm ground.*

**! Bitte beachten, dass das Stativ für eine max. Neigung von 5 Grad ausgelegt ist.**

**! Please take into consideration, that the stand is only to be used on max. 5 degree Slope.**



Klemmhebel lösen, Stativarm positionieren und wieder festziehen.

*Release set handle, reposition arm of the stand, then fix adjustment lever to lock into position.*



**Höhe / Hight : 80cm**


**Arm / Arm : 60 cm**

**Gewicht / Weight : 1,5 kg**

## 5 Montieren der **Q.Light® 70**

Entriegeln Sie das Kugelgelenk durch kurzes Drehen des Klemmhebels (ca. 1/2 Umdrehung).

*Release the balljoint by turning the set handle.*

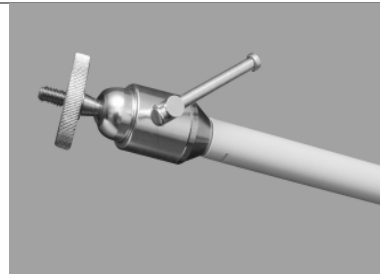

Setzen Sie nun das Gerät **Q.Light® 70** auf das Kugelgelenk am Stativarm.  
*Insert by screwing gently the **Q.Light® 70** on the top of the ball joint at the end of the arm.*



Mittels des Rändelrades, unterhalb des Gewindes am Kugelgelenk schrauben Sie dieses Gewinde im Uhrzeigersinn vollends in die Gewindeaufnahme im Gerät **Q.Light® 70** ein.  
*Use the disc positioned below the mounting to engage the thread of the ball joint clockwise into the thread of the **Q.Light® 70**.*



Erneutes Drehen des Klemmhebels am Kugelgelenk setzt das Gelenk fest. Leichtes Drehen der **Q.Light® 70** im Uhrzeigersinn sorgt für einen festen Sitz auf dem Kugelgelenk.

*Fix the balljoint by turning the set handle. Additionally turn the **Q.Light® 70** clockwise to provide a firm fixation.*



## 6 Anschliessen der **Q.Light® 70**:

Winkelstecker des Stromkabels in die Anschlussbuchse der **Q.Light® 70** stecken.

Fix the plug of the transformer into the power socket of the **Q.Light® 70**



Das Stromkabel mit Hilfe der beiliegenden Kabelklemmen am Stativarm und gegebenenfalls am Stativstandrohr befestigen.

*Fix the cable, using the cable clamps provided on the stand tube.*

It is complete!!!

Now appreciate the benefits of your **Q.Light®** treatments.

Geschafft!!!

Nun genießen Sie die Behandlungen mit Ihrer **Q.Light®**

